

Guía de inicio rápido


Signia TV Sound

Audio estéreo de alta calidad transmitido directamente a tus audífonos Signia con Bluetooth®

COMING SOON

Cómo encender el TV Sound

1. Coge el cable Micro USB que viene con tu TV Sound
2. Conecta el Micro USB al dispositivo TV Sound
3. Conecta el Micro USB al televisor a través de la toma USB del televisor
4. El televisor debe estar encendido

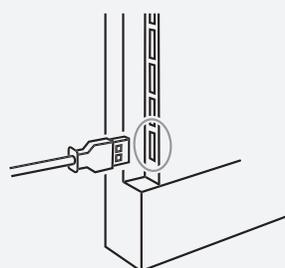



Conexión de la entrada de audio

Mediante cable analógico

1. Conecta el televisor TV Sound a la red eléctrica
2. Conecta el cable analógico a la parte posterior del televisor (entrada púrpura)
3. Conecta el otro extremo del cable analógico en las tomas correspondientes del televisor
4. Enciende el televisor para iniciar el audio

Mediante cable óptico

1. Conecta el televisor TV Sound a la red eléctrica
2. Conecta el cable óptico a la parte posterior del TV Sound (entrada azul)
3. Conecta el otro extremo del cable óptico a la toma «Optical OUT» del televisor
4. Enciende el televisor para iniciar el audio

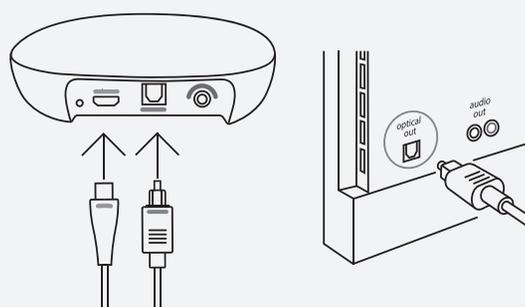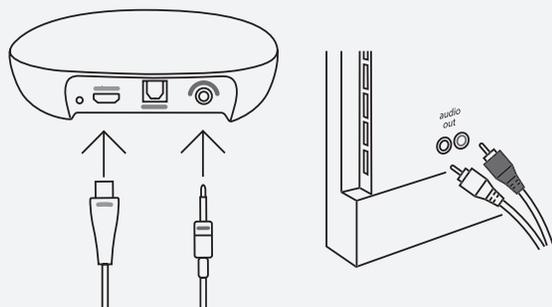

signia

Guía de inicio rápido

Signia TV Sound

Emparejar los audífonos con TV Sound

1. Encender el TV Sound
2. Reinicia los audífonos
3. Coloca los audífonos en el rango de emparejamiento (de 0 a 20 cm)

- El LED parpadea en azul durante el emparejamiento
- El LED se ilumina en azul fijo tras el emparejamiento

Para emparejar varios audífonos, sigue el mismo procedimiento para cada par de audífonos

CONSEJO: Si los audífonos ya están emparejados con otro dispositivo (como un teléfono), asegúrate de que no está cerca o apaga el Bluetooth® durante el emparejamiento de TV Sound

COMING SOON



Empieza a transmitir con Signia App

Paso 1:

- Abre Signia App
- Pulsa Stream en la parte inferior del menú

Paso 2:

- Pulsa Play para iniciar la transmisión de audio del televisor

Paso 3:

- Ajusta el volumen si lo deseas
- Pulsa Pausa para detener la transmisión

